

Ficha Técnica de Produto

Código de Produto **505357**

Mascaras Facial Descartavel Avulso 50un - **BigHome**

Unidade

Tipo	Caixa cartão
Peso Escorrido (kg)	0,00
Peso Liquido (kg)	0,18
Peso Bruto (kg)	0,23
Dimensões (cm)	10,00 x 10,00 x 9,00
Volume (cm3)	900,00



Caixa

Grupagem Venda	40,00
Dimensões (m)	0,50 x 0,20 x 0,38
Volume (m3)	0,04
Peso Bruto (kg)	9,30

Paleta

Caixa p/ Camada	4
Nº Camadas	4
Caixas p/ Paleta	16
Peso Bruto (kg)	148,80
Tipo de Paleta	1.20 x 0.80

Características do Produto

Material	Polipropileno (TNT).
Observações	NIVEL 2 - Máscara facial descartável destinada à utilização por profissionais que não sendo de saúde estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos.
Condições de Utilização	<p>Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de protecção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.</p> <p>Para mais informação, consultar https://covid19.min-saude.pt. A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correcta. Seguem instruções recomendadas para o uso correcto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS nº 019/2020, de 03/04/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com outra cor (fa externa) virado para fora; c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara; d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos; e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos aros ou elásticos; h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduo i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES: Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

Processo de fabrico	O polipropileno (TNT) composto por 3 camadas é alimentado a uma máquina em bobine que corta o material às dimensões do produto. As bordas do produto são seladas através de ultrassons. São posteriormente adicionados os elásticos e o clipe nasal que também são selados através de ultrassons.
----------------------------	---

Medidas	<p>Largura (a) - 175mm</p> <p>Altura (b) - 95mm</p>
----------------	---

