

Ficha Técnica de Produto

Código de Produto **505358**

Mascara Facial Infantil Descartavel 5un - BigHome

Unidade

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tipo | N/A |
| Peso Escorrido (kg) | 0,00 |
| Peso Liquido (kg) | 0,02 |
| Peso Bruto (kg) | 0,02 |
| Dimensões (cm) | 10,00 x 16,00 x 2,00 |
| Volume (cm3) | 320,00 |



5609147020589

Caixa

| | |
|-----------------|--------------------|
| Grupagem Venda | 50,00 |
| Dimensões (m) | 0,10 x 0,10 x 0,16 |
| Volume (m3) | 0,00 |
| Peso Bruto (kg) | 0,23 |

Palete

| | |
|------------------|-------------|
| Caixa p/ Camada | 40 |
| Nº Camadas | 12 |
| Caixas p/ Palete | 480 |
| Peso Bruto (kg) | 110,40 |
| Tipo de Palete | 1,20 x 0,80 |

Características do Produto

| | |
|-------------------------|---|
| Material | Polipropileno (TNT). |
| Observações | NIVEL 2 - Máscara facial descartável destinada à utilização por pessoas expostas ao contacto com um elevado número de indivíduos. |
| Validade | 24 Meses |
| Condições Armazenamento | Local seco e resguardada de potenciais contaminações. |
| Condições de Utilização | <p>Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de protecção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.</p> <p>Para mais informação, consultar https://covid19.min-saude.pt. A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correcta. Seguem instruções recomendadas para o uso correcto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS nº 019/2020, de 03/04/2020:</p> <p>a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;</p> <p>b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com outra cor (face externa) virado para fora;</p> <p>c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;</p> <p>d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;</p> <p>e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;</p> <p>f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;</p> <p>g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos aros ou elásticos;</p> <p>h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;</p> <p>i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara.</p> |

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES: Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

| | |
|---------------------|--|
| Processo de fabrico | A matéria prima, o polipropileno (TNT), é composto por 3 camadas, em que numa delas é impresso o padrão através de flexografia. O material é então alimentado a uma máquina em bobine que corta o material dimensões do produto. As bordas do produto são seladas através de ultrasons. São posteriormente adicionados os elásticos e o clipe nasal que também são selados através de ultrasons. |
|---------------------|--|

| | |
|---------|---|
| Medidas | <p>Largura (a) - 145mm</p> <p>Altura (b) - 90mm</p> |
|---------|---|

